

PHALLI MAX

Comment utiliser l'appareil ?

Comment placer les électrodes ?

Le Phalli-Max propose 3 programmes différents pour 3 types de stimulation différents. Il est important de respecter la couleur des câbles lors du branchement sur les électrodes.

N'utiliser le gel conducteur qu'avec l'électrode cordelette noire ; ne pas utiliser de gel avec les électrodes auto-collantes Stimex 5x5 cm ou 1,5x 7,5 cm rectangulaires.

APPAREIL ETTEINT, relier la fiche noire du câble double sortie à la prise placée sur la face avant de l'appareil. Relier ensuite le câble bleu et le câble rouge comme indiqué ci-dessous pour chaque programme.

Pour quel type de problème d'érection ?

Le Phalli Max est indiqué pour les problèmes d'érection liés à un déficit ou à une détérioration des cellules musculaires du pénis ou de la musculature périnéo-scrotale, déficits de type organique et non psychologiques.

Important : même si une thérapie par auto-injection intra-caverneuse (CAT) n'a pas réussie, une utilisation de l'électrothérapie peut vous permettre de nouveau à l'érection. En cas d'échec après le traitement par électrostimulation, il est également possible qu'un nouvel essai par auto-injection intra-caverneuse soit fructueux.

Combien de temps et combien de fois par jour ?

Une thérapie par électrostimulation doit au minimum duré 3 mois. Certains l'utilisent pendant une année ou plus, ceci afin d'améliorer encore plus la qualité de l'érection. Utiliser le programme 1 ou 2 + le programme 3 une fois par jour.

PROGRAMME 1 : Renforcement des cellules musculaires du pénis




Placement des électrodes

Après avoir enduit l'électrode cordelette de gel conducteur fourni avec l'appareil, entourer le bout du pénis avec l'électrode cordelette gelifiée, légèrement juste au dessus du gland. Serrer l'électrode cordelette sans que celle-ci coupe la circulation sanguine, de façon à ce qu'elle ne tombe pas.


Relier ensuite une des 2 extrémités de l'électrode cordelette noire au câble rouge de l'appareil comme indiqué sur le dessin.

Relier le câble bleu à une électrode auto-collante carrée de taille 5x5 cm et placer celle-ci juste au dessus des poils au maximum du bas ventre.

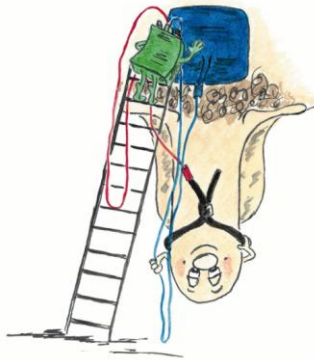

Réglage de l'intensité

Régler toujours l'intensité de façon à ressentir une stimulation par fourmillements toujours agréable. Le niveau de réglage est personnel à chacun selon la sensation ressentie. Baisser l'intensité si la stimulation est douloureuse.

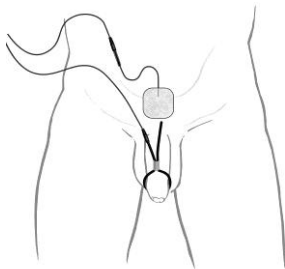


Nombre de séances par jour

Utiliser ce programme 30 minutes par jour, en alternant chaque jour avec le programme 2.

Débrancher toujours câbles et électrodes à la fin d'une séance.

PROGRAMME 2 : Renforcement des cellules musculaires du pénis

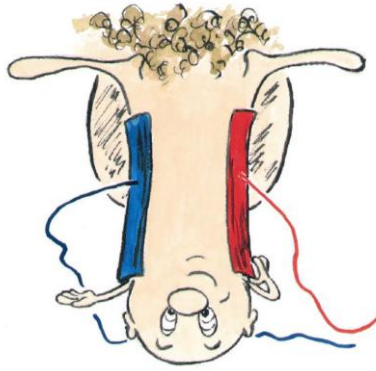

Placement des électrodes

Placer les électrodes autocollantes de forme longue rectangulaire sur les 2 côtés du pénis comme indiqué sur le dessin.

Réglage de l'intensité


Régler toujours l'intensité de façon à ressentir une stimulation par fourmillements pulsatifs toujours agréable. Le niveau de réglage est personnel à chacun selon la sensation ressentie. Baisser l'intensité si la stimulation est douloureuse.

Nombre de séances par jour

Utiliser ce programme 30 minutes par jour, en alternant chaque jour avec le programme 2.

Débrancher toujours câbles et électrodes à la fin d'une séance

PROGRAMME 3 : Renforcement de la musculature du plancher pelvien

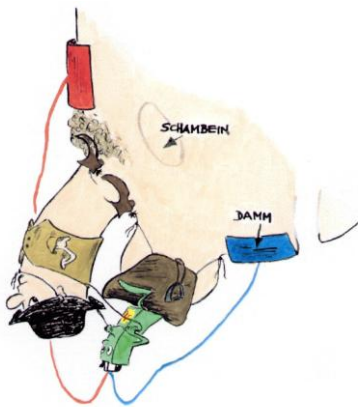

Placement des électrodes

Placer les électrodes autocollantes de forme carrée de taille 5x5 cm comme indiqué sur le dessin : relier le câble bleu à l'électrode placée sur le muscle périnéo-scrotal, relier le câble rouge à l'autre électrode de taille 5x5 cm placée juste au dessus des poils du pénis, au maximum du bas ventre.

Réglage de l'intensité

Régler toujours l'intensité de façon à ressentir une stimulation par fourmillements toujours agréable. Le niveau de réglage est personnel à chacun selon la sensation ressentie. Baisser l'intensité si la stimulation est douloureuse.

Nombre de séances par jour

Utiliser ce programme 30 minutes une fois par jour, en plus de la séance journalière effectuée avec le programme 1 ou 2.

Débrancher toujours câbles et électrodes à la fin d'une séance.

Contre-indications

Ne pas stimuler sur une peau irritée, eczémateuse, ou sur plaie.

Ne pas stimuler après une opération ou une atteinte des nerfs, ce qui empêcherait un réglage correct de l'intensité de stimulation. Dans ce cas placer 2 électrodes auto-collantes sur l'avant-bras et régler l'intensité jusqu'à ressentir une stimulation agréable. Ne dépasser en aucun cas le niveau d'intensité atteint sur l'avant-bras pour une stimulation indiquée pour les 3 programmes.

Ne pas stimuler en cas de tumeur dans la zone du plancher périnéo-scrotal.

Ne pas stimuler en cas de port de stimulateur cardiaque

EFFETS SECONDAIRES

Des effets secondaires sont peu fréquents.

De légères irritations là où étaient placées les électrodes pendant la stimulation peuvent apparaître directement après la stimulation. Elles sont souvent dues à l'effet de vasodilatation sanguin produit par la stimulation sur les vaisseaux et s'effacent après quelques heures. Dans le cas contraire consulter votre médecin traitant, il peut s'agir d'un problème d'allergie aux électrodes.

Une forme d'impulsion spéciale est délivrée par l'appareil afin d'éviter les irritations cutanées. Cependant par mesure de précaution ne pas excéder un temps de séance de 40 minutes maximum.

Les courbatures des muscles du plancher pelvien sont possibles après une stimulation avec le programme 3.

Réduire le temps de séance pour le ré-augmenter de nouveau au fil des séances.

Malgré toutes les mesures de précaution il est parfois possible qu'une douleur passagère apparaisse sur le site de stimulation, douleur qui s'efface spontanément après quelques minutes : dans ce cas déplacer légèrement le site de stimulation (les électrodes) et diminuer le temps de séance ainsi que l'intensité que vous utilisez.